


Document no	35-06-CL01	<h1>Pré-désinfection et envoi des instruments</h1>	
Version	1.4		
Valable dès le	22.09.2022		
Page	1 de 1		

## TOUT DE SUITE APRÈS UTILISATION

- Immerger les instruments ouverts dans une solution désinfectante, tel que le Septo PreClean 1% (disponible chez SteriLease SA)
- Temps de trempage : minimum 15 minutes et maximum 72 heures
- Rincer abondamment les instruments
- Sécher les instruments avec un chiffon, pas de séchage à l'air libre

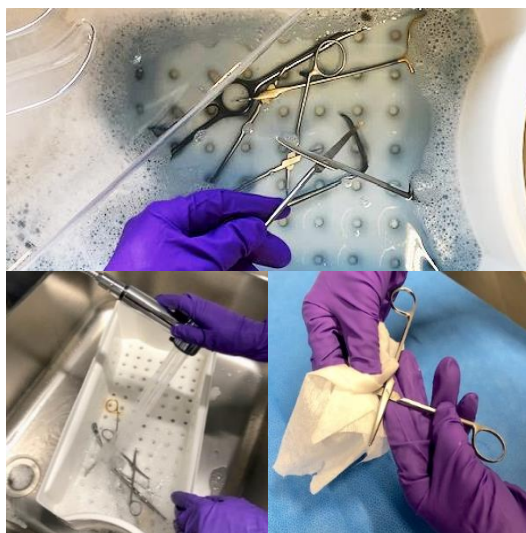

## EMBALLAGE DES INSTRUMENTS

- Insérer les instruments dans le sachet plastique de transport
- Bien refermer le sachet plastique de transport



## ENVOI

- Après avoir placé le sachet munis de tous les instruments prêts pour l'envoi dans la caisse de transport, placer la fiche d'envoi des instruments dans la pochette à l'extérieur du couvercle
- Refermer le couvercle de la caisse de transport et sceller avec les plombs rouges
- Retourner la fiche d'adresse sur le couvercle de la caisse de transport pour laisser voir l'adresse de SteriLease SA
- Mettre la caisse à disposition et à l'emplacement prévu pour l'expédition

