

Document no	35-06-CL03	Pré-traitement avec Neodisher® PreStop et envoi des instruments	
Version	1.3		
Valable dès le	22.09.2022		
Page	1 de 1		

NEODISHER® PRESTOP

- Agent anticorrosif à pulvériser sur les instruments chirurgicaux (DMx) directement après leur utilisation.
- L'utilisation de ce produit nécessite l'envoi journalier d'instruments chez SteriLease SA

APRÈS UTILISATION DES INSTRUMENTS

- Insérer les instruments ouverts dans le plastique de transport directement après utilisation et déposer le sachet dans la caisse de transport.
- Vaporiser ces instruments avec le spray Neodisher® PreStop (disponible chez SteriLease SA).
- Fermer le sachet pour garder les instruments humides (conditions afin que l'inhibiteur de corrosion fasse son effet)



ENVOI LE MÊME JOUR

- Après avoir placé le sachet munis de tous les instruments prêts pour l'envoi dans la caisse de transport, placer la fiche d'envoi des instruments dans la pochette à l'extérieur du couvercle
- Refermer le couvercle de la caisse de transport et sceller avec les plombs rouges
- Retourner la fiche d'adresse sur le couvercle de la caisse de transport pour laisser voir l'adresse de SteriLease SA
- Mettre la caisse à disposition et à l'emplacement prévu pour l'expédition

